

Pirms alergiju diagnostikas serumā vienmēr izslēdziet citus niezes cēloņus!!!

		
Valsts	Nīderlande/Spānija/ASV	Vācija
Testa metodika	• Trīs monoklonālas IgE atvasinātas antivielas • Jaunākās paaudzes CCD (ogļhidrāti) bloķēšana • Augsts specifiskums un jutība	Monoklonāls Fc Epsilon-Receptoru tests
Īss raksturojums	• Vides + istabas alergēni (32 alergēni) • Zāle (12), graudaugi (3), koki (7) • Putekļu ērcītes (5), pelējuma sēnes (3), malasēzija, blusa • Barības alergēni IgE+IgG (23 alergēni) • Liellops, vista, jērs, cūka, tītars, briedis, zirgs, trusis, pīle, baltās zivis, zilās zivis, piens, ola, soja, kukurūza, kartupelis, cukurbiete, burkāns, zirņi, kvieši, rīss, auzas, raugs.	Iesakām kombinēt divus paneļus: • 7106 Sezonālais (15alergēni) • Stiebrzāles, koki, augi (15) • 7107 Istabas alergēni (6 alergēni) • Pelējuma sēnes (2), putekļu ērcītes (4) Iespējams izvēlēties citus paneļus, pievienot individuālus alergēnus,, cenas skat: (LABOKLIN.COM)
Steroīdu ietekme uz diagnostiku	• Jāpārtrauc ārstēšana ar ilgstošas darbības steroīdiem	• Ārstēšana jāpārtrauc 2 dienas – 3 mēnešus pirms testa - atkarībā no steroīdu darbības ilguma
Dzīvnieka vecums	• Suņiem un kaķiem no 1 gada	• Suņiem 7-8 mēn.v., • Kaķiem ~ 6 mēn.v.
Rezultāti	• 2 dienas pēc saņemšanas laboratorijā	• 2-7 dienas
Materiāls	• Tīrs serums 1.5 ml	• Tīrs serums 3 ml
Hiposensitizācija	• 1 vai 2 pudelītes (max 8 alergēni) • Ilgums – 10 mēneši	• 6111 2 pudelītes (8 alergēni) • Ilgums – 6 mēneši
Hiposensitizācijas injekciju protokols	• 1.mēnesi injekcijas 1x nedēļā • ~ 2/3 mēnesi injekcijas 1x divās nedēļās • ~ 3/4 mēnesi injekcijas 1x mēnesī	• 1.mēnesi injekcijas – 1x nedēļā • ~ 2.mēnesi injekcijas – 1x divās nedēļās • ~ 4 mēnesi injekcijas – 1x mēnesī
Hiposensitizācija – sublingvāla	• Atkarībā no dzīvnieka svara 1-3 pilieni/ dienā • Ilgums 3-5 mēneši	
Uzturošā deva	• Skatīt Hiposensitizācijas info	• 6113- 1 pudelīte • Ilgums – 10 mēneši, Injekcijas 1x mēnesī/retāk